


So wird es gemacht!


Die Applikatorverpackung öffnen und den Applikator mit Anästhesie-Gel auffüllen bis ein Tropfen am Ende austritt.

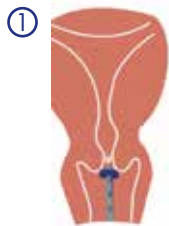


- ① Entfernen des Applikators aus der Verpackung und platzieren desselben am äußeren Muttermund.



- ② Verschieben des Applikators in den Cervikalkanal unter gleichzeitiger Gel-Applikation, bis der Messring die Markierung 3 bzw. 4 cm erreicht hat (Cervixlänge).

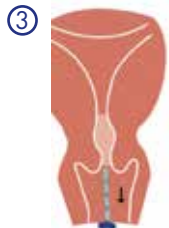

- ③ Zurückziehen und Entfernen des Applikators unter weiterer Gel-Applikation (insgesamt ca. 4 ml).

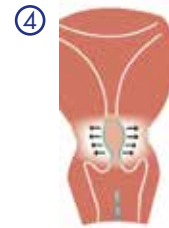

- ④ Bei Kopf-Tieflagerung der Patientin ca. 7 bis 10 Minuten warten, bis die maximale Anästhesiewirkung erreicht ist. Danach Sondenlänge-Messung mit dem Applikator.